

**Desinfektionsprocedure ved forsendelse af Mentor brystimplantater i forbindelse med reklamation:**

1. Implantatet nedsænkes i 70% alkohol (hospitalssprit, 70%)  
Implantater skal være helt dækket af væsken.
2. Implantatet skal ligge minimum 4 timer i væsken
3. Vigtigt at al biologisk materiale fjernes fra implantatet
4. Implantatet aftørres med et fnugfrit materiale
5. Implantatet lægges i en plastpose og lukkes forsvarligt
6. Pak herefter plastposen med implantatet ind i et papirklæde
7. Det indpakkede implantat sendes af sted samme dag, print kopien af det udfyldte ECM skema som du får tilsendt via Noscomed's hjemmeside, vedlæg evt. tilsvarende dokumentation.

8. Reklamationsprodukt(er) sendes til:

Noscomed Medical Supply A/S  
Svanemøllevej 11  
2100 København Ø  
Att: Complaint Team

9. Spørgsmål vedr. desinfektionsmetoden kan stilles til:  
Anette Bergstrøm, Business Unit Manager,  
[ab@noscomed.com](mailto:ab@noscomed.com)  
Mobil: +45 22 17 14 44

Revideret, København den 28-03-2022

Noscomed Complaint Team.